

Schippers MICRO ID/12 ISO-transponder

0409999 - 0409999-10 - 040998 - 0409984



MS Schippers

Passion for Farming

 Klantenservice	+31(0) 497-339787
 Klantenservice/Service Clientèle	+32(0)14-820713
 Kundenservice	+49(0) 2833 923630
 Kundeservice	+45 89884187
 Servicio al cliente	+34 931816433
 Customer Service	+44(0) 1733592049
 Service Clientèle	+33(0) 299854747
 Customer Service Export	+31(0) 497700278



Schippers MICRO ID/12 Transpondedor ISO

Instrucciones:

Componentes del producto

1. Microchip 2. 12 x 12 mm (FDX-B según norma ISO 11784/11785)
2. Jeringa aplicadora
3. Pegatina con código de barras con el código del microchip

Instrucciones de uso

1. En primer lugar, asegúrese de que no haya otro microchip bajo la piel del animal antes de implantar este microchip.
2. Lea el microchip antes de implantarlo.
3. Quite el tapón de la jeringa.
4. Inyecte la jeringa en el centro del hombro y accione el émbolo.
5. Tras implantar el microchip, presione el punto de inyección para detener la hemorragia.
6. Una vez que haya implantado el microchip subcutáneo, use el lector para identificarlo.

Aviso

Este producto está esterilizado con óxido de etileno.
No lo utilice si el envase está dañado.