

Étape 6

Étalonnage

Vous devez utiliser votre lecteur de glycémie pour étalonner le système Dexcom G4 PLATINUM. Au terme de la période de démarrage de 2 heures, vous devez procéder à deux étalonnages avant que des valeurs de glucose relevées par le capteur n'apparaissent. Vous devez saisir les valeurs de glucose des étalonnages dans le récepteur dans un délai de cinq minutes après l'analyse avec votre lecteur de glycémie.

Étalonnage de démarrage :


- Après la période de démarrage de deux heures, le message avec les deux gouttes de sang de l'étalonnage de démarrage apparaîtra sur l'écran du récepteur. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour effacer cette alerte.
- Lavez-vous et séchez-vous les mains.
- Prenez une mesure de votre taux de glucose au bout du doigt à l'aide de votre lecteur de glycémie.
- Depuis n'importe quelle courbe de tendance, appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur le bouton **BAS** pour mettre Entrer glyc. en surbrillance. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.
- Pour l'étalonnage de démarrage, la valeur de glucose par défaut sur le récepteur est de 120 mg/dl. Appuyez sur la touche **HAUT** ou sur la touche **BAS** pour saisir la valeur de glucose exacte relevée par le lecteur de glycémie. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche **SÉLECTIONNER** pour valider l'étalonnage.
- Répétez les étapes c à g pour saisir une deuxième valeur de glucose.



Message d'étalonnage de démarrage

Mise à jour de l'étalonnage :

Le message avec la goutte de sang de l'étalonnage apparaîtra sur l'écran du récepteur pour vous faire savoir qu'une mise à jour de l'étalonnage est nécessaire. Pour confirmer ce message, appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.

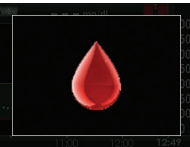

Message d'étalonnage

Après l'étalonnage de démarrage, vous devez procéder aux mises à jour de l'étalonnage une fois toutes les 12 heures minimum.

REMARQUE : Un étalonnage moins fréquent que l'intervalle recommandé peut être à l'origine d'une inexactitude des mesures de glucose relevées par le capteur. Vous pouvez procéder à un plus grand nombre d'étalonnages chaque jour si vous voulez. Pour plus de détails sur l'étalonnage, consultez le guide d'utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM.

Dépannage relatif au capteur

Pour toute question ou tout problème de dépannage non résolu(e), reportez-vous au guide d'utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM, ou contactez votre distributeur local. Le tutoriel en ligne du système Dexcom G4 PLATINUM est également disponible sur www.dexcom.com.

Goutte de sang dans la zone d'état		Étalonnage nécessaire. Procédez à un étalonnage, comme décrit à l'étape 6 du présent guide de démarrage rapide.
Erreur d'étalonnage - Patientez 15 minutes		Le capteur ne s'étalonne pas correctement. - Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER, apparaîtra dans la barre d'état. - Patientez 15 minutes, puis procédez à un étalonnage. - Si l'erreur persiste, procédez à un autre étalonnage et patientez 15 minutes. - Si aucune valeur de glucose relevée par le capteur ne s'affiche, contactez votre distributeur local.
Erreur d'étalonnage - Patientez 1 heure		Le capteur ne s'étalonne pas correctement. - Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER, apparaîtra dans la barre d'état. - Patientez une heure, puis procédez à un étalonnage. - Patientez 15 minutes. Si aucune valeur de glucose relevée par le capteur ne s'affiche, contactez votre distributeur local.
Erreur de mesure du glucose dans la zone d'état		Patientez. ??? disparaît d'habitude de lui-même au bout de quelques minutes ou heures. Si le symbole demeure au bout de trois heures, contactez votre distributeur local. - Ne procédez à aucun étalonnage. - Assurez-vous que le réceptacle du capteur adhère bien au corps et que rien ne frotte contre lui. - Vérifiez que le transmetteur est enclenché des deux côtés.
Capteur en panne		Le capteur s'éteint avant la fin de la session de sept jours. - Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour effacer l'alerte/l'écran. - Contactez votre distributeur local. - Retirez le capteur en panne et insérez-en un nouveau.

Étape 7

Fin de votre session de lecture

Le capteur s'éteint automatiquement au bout de sept jours. Le récepteur vous avertira 6 heures, 2 heures et 30 minutes avant la fin de la session de lecture. L'écran Remplacer le capteur maintenant apparaîtra quand le moment est venu de retirer le capteur.



Écran Remplacer le capteur maintenant

Retrait du réceptacle du capteur et du transmetteur :

REMARQUE : Gardez le capteur et le transmetteur ensemble au moment où vous enlevez le capteur de la peau.

- Retirez le réceptacle du capteur de votre corps comme vous le feriez avec un pansement adhésif. N'ôtez pas le transmetteur du réceptacle du capteur tant que le capteur n'a pas été entièrement retiré du corps.

- Placez le réceptacle du capteur/transmetteur sur une surface plane. Vous pouvez retirer le transmetteur de deux manières différentes :

- Écartez les languettes à l'arrière du réceptacle du capteur avec les doigts. Le transmetteur sortira.

OU

- Utilisez le verrou de sécurité (de l'apPLICATEUR du capteur). Insérez les mâchoires dentelées du verrou de sécurité autour de l'extrémité large du transmetteur dans le réceptacle du capteur. Appuyez à fond sur le verrou de sécurité, puis tirez vers le haut. Le transmetteur sortira.




Transmetteur avec le verrou de sécurité enclenché

- Conservez le transmetteur. Jetez le capteur en accord avec les directives locales concernant la mise au rebut de composants ayant été en contact avec du sang.

Affichage du récepteur

Cet écran apparaîtra quand vous allumerez le récepteur pendant une session de lecture.

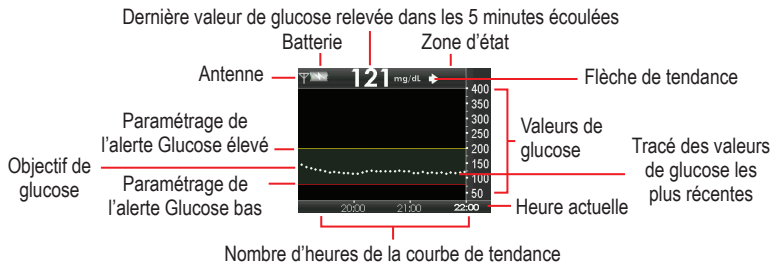

REMARQUE : Les valeurs de glucose relevées par le capteur supérieures au paramètre d'alerte élevé sont de couleur jaune. Les valeurs de glucose relevées par le capteur inférieures au paramètre d'alerte bas sont de couleur rouge. Les valeurs de glucose ciblées sont de couleur blanche.

Points à observer pour l'étalonnage

- Utilisez le même lecteur de glycémie pour tous les étalonnages effectués au cours d'une session de lecture.
- Assurez-vous que vos bandes réactives de glucose sont codées correctement et qu'elles n'ont pas atteint leur date d'expiration.
- Lavez-vous les mains et séchez-les avant de procéder à l'analyse de votre taux de glucose.
- Utilisez uniquement les valeurs de glucose obtenues par prélèvement **au bout du doigt** pour l'étalonnage.

Points à éviter lors de l'étalonnage

- Ne procédez pas à l'étalonnage si vous apercevez les symboles **Y** ou **???** dans la barre d'état.
- Ne procédez pas à l'étalonnage si votre niveau de glucose est supérieur à 400 mg/dl ou inférieur à 40 mg/dl.
- Ne procédez pas à l'étalonnage lorsque de l'acétaminophène (paracétamol) est actif dans votre corps.

Alarme Glucose bas

Le système Dexcom G4 PLATINUM est doté d'une alarme Glucose bas automatique configurée sur 55 mg/dl. Il est impossible de modifier ou de désactiver cette alerte et ses paramètres de répétition. Si cette alarme apparaît/retient :

- Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour l'effacer.

- Cette alarme réapparaît/retient une nouvelle fois au bout de 30 minutes si les valeurs de glucose relevées par le capteur sont toujours inférieures ou égales à 55 mg/dl.




Alarme Glucose bas

Fonctionnalités avancées du système de mesure continue du glucose Dexcom G4 PLATINUM

Le système Dexcom G4 PLATINUM est pourvu de fonctionnalités et alertes avancées que vous pouvez utiliser pour amener la détection de votre taux de glucose à un stade supérieur. À l'exception des flèches de tendance et des marqueurs d'événement, ces alertes avancées sont désactivées quand vous acquérez votre système Dexcom G4 PLATINUM, mais vous pouvez les activer et les personnaliser.

Fonctionnalité avancée n° 1 : Flèches de tendance

Une flèche de tendance peut s'afficher à côté de la valeur de glucose relevée par le capteur sur les écrans de tendance du récepteur. Les flèches de tendance vous indiquent la direction et la vitesse auxquelles votre taux de glucose évolue. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM.

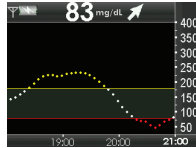

La flèche de vitesse de variation apparaît dans le coin en haut à droite de la courbe de tendance.

→	↗	↑	↗↗	↘	↓	↘↘	↘
Constante	Lente augmentation	Augmentation	Augmentation rapide	Lente diminution	Diminution	Diminution rapide	Aucune information sur la vitesse de variation
0-1 mg/dl/min	1-2 mg/dl/min	2-3 mg/dl/min	3 mg/dl/min ou plus	1-2 mg/dl/min	2-3 mg/dl/min	3 mg/dl/min ou plus	
Augmentation ou réduction de 0-30 mg/dl en 1/2 heure	Augmentation de 30-60 mg/dl en 1/2 heure	Augmentation de 60-90 mg/dl en 1/2 heure	Augmentation de 90 mg/dl ou plus en 1/2 heure	Réduction de 30-60 mg/dl en 1/2 heure	Réduction de 60-90 mg/dl en 1/2 heure	Diminution de 90 mg/dl ou plus en 1/2 heure	

Fonctionnalités avancées (suite)

Fonctionnalité avancée n° 2 : Marqueurs d'événement

Les marqueurs d'événement permettent de consigner des informations susceptibles de vous aider, vous et votre équipe soignante, à mieux comprendre vos profils et tendances glycémiques. Les événements incluent les glucides (grammes), l'insuline (unités), l'exercice (intensité et durée) et la santé (maladie, stress, symptômes importants/bénins, cycle menstruel, consommation d'alcool). Les marqueurs d'événement n'apparaissent pas sur le récepteur, mais vous pouvez les télécharger dans le logiciel Dexcom Studio. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM.

Fonctionnalité avancée n° 3 : Alertes avancées


Pour activer l'une des alertes avancées, procédez comme suit :

- Depuis n'importe quelle courbe de tendance, appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour accéder au menu principal.


- Appuyez sur la touche **BAS** pour mettre Alarmes en surbrillance. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.

- Appuyez sur la touche **BAS** pour mettre Avancé en surbrillance. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.

- Appuyez sur la touche **HAUT** ou sur la touche **BAS** pour mettre en surbrillance la fonctionnalité avancée qui vous intéresse. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.

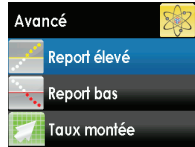

Menu Avancé, option Report élevé en surbrillance

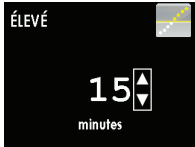


Écran de réglage d'alerte Élevé, option 15 minutes sélectionnée


Fonctionnalités avancées (suite)

(2) Alertes de taux de montée et de chute du glucose


Vous pouvez régler les alertes de taux pour être prévenu quand votre niveau de glucose relevé par le capteur augmente (alerte de montée) ou diminue (alerte de chute) de 2 ou 3 mg/dl ou davantage par minute. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM.

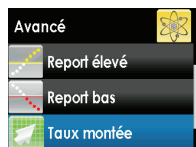

Menu Avancé, option Taux montée en surbrillance

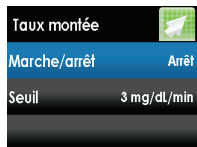


Écran Taux montée, option Marche/Arrêt en surbrillance

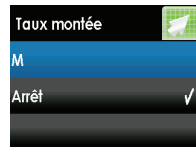


Écran Taux Montée, M en surbrillance

(3) Alerte Hors plage

Vous pouvez régler l'alerte Hors plage pour être prévenu en cas d'absence de communication entre le transmetteur et le récepteur pendant un laps de temps de 20 à 200 minutes. Le symbole Hors plage (**Y**) apparaîtra dans le coin en haut à droite de la courbe de tendance, et l'écran d'alerte Hors plage s'affichera. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation du système Dexcom G4 PLATINUM.

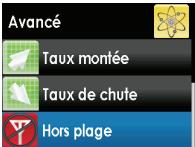

Menu Avancé, option Hors plage en surbrillance

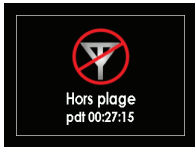


Écran d'alerte Hors plage

Questions fréquemment posées (suite)

Comment puis-je modifier mes niveaux d'alerte de glucose élevé/bas ?

Procédez comme suit :

- Depuis n'importe quelle courbe de tendance, appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur la touche **BAS** pour mettre Alarmes en surbrillance. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER**.

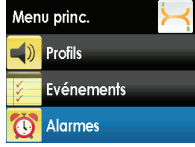

Menu principal, option Alarmes en surbrillance



Menu Alarmes, Élevé en surbrillance



Écran Élevé, option Niveau en surbrillance

- Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour sélectionner Élevé. Ou, appuyez sur la touche **BAS**, puis sur la touche **SÉLECTIONNER** pour sélectionner Alarme bas.

- Utilisez la touche **HAUT** ou la touche **BAS** pour changer le niveau d'alerte. e. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour valider les modifications.

Combien de temps dure la garantie du transmetteur Dexcom G4 PLATINUM ?

La garantie du transmetteur est de 6 mois.

Combien de temps dure la garantie du récepteur Dexcom G4 PLATINUM ?

La garantie du récepteur est de 12 mois.

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Hors des États-Unis : Contactez votre distributeur local

EC REP MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vraals
Tel. +31.43.306.3320
Fax. +31.43.306.3338

CE
0086

© 2013 Dexcom, Inc. Tous droits réservés.

LBL-011901 Rev 01 MT22115

Dexcom, Dexcom G4, Dexcom G4 PLATINUM, Dexcom Makes Sense et Dexcom Studio sont des marques de commerce de Dexcom, Inc., déposées ou non, aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits ou de sociétés pouvant figurer dans cette publication sont des noms de fabrique, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

dexcom
makes sense.