

Dexcom G6 Veiligheidsvoorschriften

Gebruiksindicaties

Het Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System (Dexcom G6-systeem of G6) is een glucosemonitorsysteem voor personen van 2 jaar en ouder. Het Dexcom G6-systeem is ontworpen ter vervanging van bloedglucose (BG)-tests met vingerprik voor behandelbeslissingen.

De interpretatie van de resultaten van het Dexcom G6-systeem moet gebaseerd zijn op de glucosetrends en verschillende opeenvolgende metingen in de tijd. Het Dexcom G6-systeem helpt ook bij de detectie van episodes van hyperglycemie en hypoglycemie, waardoor zowel acute als langdurige therapieaanpassingen mogelijk zijn.

Het Dexcom G6-systeem is bedoeld voor gebruik door patiënten thuis en in zorginstellingen.

Belangrijke informatie voor gebruikers

Lees de productinstructies door voordat u de G6 gebruikt. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en andere belangrijke informatie voor de gebruiker kunt u vinden in de productinstructies die bij de G6 worden geleverd. Bespreek met uw arts hoe u de informatie op de G6 moet gebruiken om uw diabetes te helpen beheren. In de producthandleiding vindt u belangrijke informatie over het verhelpen van problemen met de G6 en over de prestatiekenmerken van het systeem.

Contra-indicatie

• Geen MRI/CT/Diathermie – MR niet veilig

Draag uw CGM (sensor, zender, ontvanger of mobiel apparaat) niet bij magnetische resonantiebeeldvorming (MRI), computertomografie (CT)-scan of hoogfrequente elektrische warmtebehandeling (diathermie).

De G6 is in die situaties niet getest. De magnetische velden en de hitte kunnen de componenten van de G6 beschadigen, waardoor onjuiste G6 sensorglucosemetingen (G6-waarden) kunnen worden weergegeven of waarschuwingen kunnen worden voorkomen. Zonder G6-maatwaarden of alarm-/waarschuwingsmeldingen mist u mogelijk een ernstige gebeurtenis met een lage of hoge glucosewaarde.

Waarschuwingen

• Lees het gebruikersmateriaal

Lees het meegeleverde materiaal zorgvuldig voordat u uw G6 in gebruik neemt. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk:

- De G6 niet correct gebruiken
- De informatie van de G6 niet begrijpen
- Van invloed zijn op de goede werking
- Negeer lage/hoge symptomen niet

Negeer niet hoe u zich voelt. Als uw glucosemeldingen en G6-metingen niet overeenkomen met wat u voelt, gebruikt u uw bloedglucosemeter (meter) om beslissingen te nemen over diabetesbehandelingen of, indien nodig, onmiddellijk medische hulp in te roepen. Haal bij twijfel uw meter tevoorschijn.

• Geen getal, geen pijn, geen CGM-behandelbeslissing

Als uw G6 geen getal of pijn weergeeft, of als uw G6 metingen niet overeenkomen met uw symptomen, gebruik dan uw meter om beslissingen te nemen over de behandeling van diabetes. Geen getal, geen pijn, geen behandelbeslissing. Haal bij twijfel uw meter tevoorschijn.

• Niet gebruiken als...

Gebruik de G6 niet als u zwanger bent, bij dialyse of als u ernstig ziek bent. Het is niet bekend hoe verschillende aandoeningen of medicijnen die bij deze populaties voorkomen de werking van het systeem kunnen beïnvloeden. G6-metingen kunnen onnauwkeurig zijn bij deze populaties.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Voorzorgsmaatregel

- **Vermijd zonnebrandcrème en insectenafweermiddel**

Sommige huidverzorgingsproducten, zoals zonnebrand- en insectenwerende middelen, kunnen het plastic dat in uw G6 wordt gebruikt doen barsten. Voordat u uw G6 gebruikt, moet u controleren of er geen barsten in uw ontvanger, zender en zenderhouder zijn. Als u een barst vindt, neem dan contact op met uw plaatselijke Dexcom-vertegenwoordiger. Laat deze huidverzorgingsproducten niet in contact komen met uw G6. Na het gebruik van huidverzorgingsproducten moet u uw handen wassen voordat u uw G6 aanraakt. Als er huidverzorgingsproducten op uw G6 terechtkomen, veegt u deze onmiddellijk af met een schone doek.

Veiligheidsvoorschriften bij het opstarten

Waarschuwingen

- **Meter tijdens opstarten gebruiken**

Wanneer u een nieuwe sensor start, krijgt u geen G6-metingen of alarmen/waarschuwingen totdat u uw sensorcode of twee kalibraties hebt ingevoerd. Gebruik uw meter om behandelbeslissingen te nemen tijdens de 2 uur durende warming-upperiode van de sensor.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Voorzorgsmaatregelen

- **Gebruik de correcte sensorcode**

Wanneer u een nieuwe sensor start, moet u een code invoeren in uw weergave-apparaat met de G6 zonder vingerprikkalibraties. Elke sensor heeft zijn eigen code afgedrukt op de achterzijde van de plakstrook. Gebruik geen code van een andere sensor of een eigen code. Als u niet de juiste code invoert, werkt uw sensor niet zo goed en kan hij onnauwkeurig zijn. Als u de sensorcode verloren hebt, kunt u de G6 kalibreren met vingerprikken.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften bij kalibratie

Kalibratie is niet nodig als gebruikers een sensorcode invoeren. Als gebruikers geen sensorcode invoeren, gelden de volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Waarschuwingen

- **Wacht niet - Kalibreer!**

Als u de kalibratiecode niet hebt gebruikt, moet u uw G6 dagelijks handmatig kalibreren met behulp van waarden die worden verkregen uit een bloedglucosemeter en vingerprikken. U moet onmiddellijk kalibreren wanneer de G6 u dit meldt. Als u niet hebt gekalibreerd toen dit werd gemeld, is uw G6 mogelijk niet nauwkeurig, dus gebruik uw glucosemeter om behandelbeslissingen te nemen totdat u uw G6 hebt gekalibreerd.

- **Gebruik de vingertoppen**

Gebruik de vingertoppen om te kalibreren vanaf uw BG-meter. Bloed van andere plaatsen kan minder nauwkeurig en niet zo tijdig zijn.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Voorzorgsmaatregelen

- **Wees accuraat, wees snel.**

Voer binnen vijf minuten na het gebruik van de meter de exacte BG-waarde in die op uw meter wordt weergegeven. Voer de G6-meting niet als kalibratie in.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften inzake systeem/hardware/software

Waarschuwingen

- **Sensordraad breekt af**

Houd rekening met kapotte of losgeraakte sensordraden. Er kan een sensordraad onder uw huid achterblijven. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke Dexcom-vertegenwoordiger.


Als er een sensordraad onder uw huid afbreekt en u deze niet kunt zien, probeer deze dan niet te verwijderen. Neem contact op met uw gezondheidszorgprofessional. Raadpleeg ook een arts als u symptomen van infectie of ontsteking – roodheid, zwelling of pijn – op de aanbrengplaats hebt.

- **Waar aanbrengen: buik of billen?**

Alle patiënten kunnen hun buik gebruiken. Patiënten van 2 tot 17 jaar kunnen ook hun bovenbil kiezen. Zoek een plaats op uw buik of bovenbil waar u wat 'gevuld' bent.

De sensor is niet getest of goedgekeurd voor andere plaatsen. Spreek met uw gezondheidszorgprofessional over de beste plaats voor u.

Leeftijd 2-17 jaar: op de buik of bovenbil aanbrengen Leeftijd 18 en ouder: op de buik aanbrengen

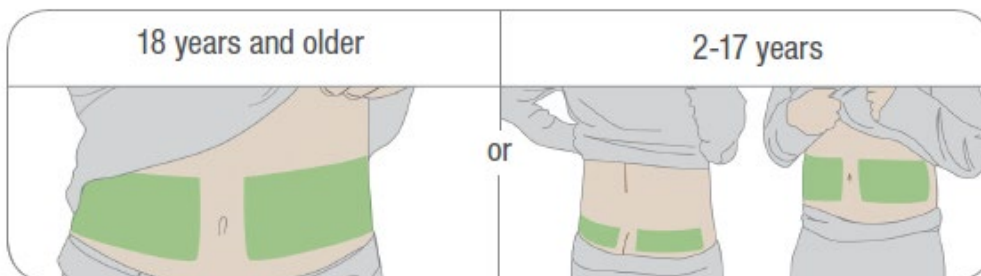

- **Waar te bewaren**

U kunt uw sensoren bij kamertemperatuur of in de koelkast bewaren - zolang de temperatuur tussen 2°C en 30°C ligt. Bewaar de sensoren niet in de vriezer.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Voorzorgsmaatregelen

- **Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken**

Gebruik geen sensoren waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, omdat deze onjuiste resultaten kunnen geven. Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de verpakking. Het is in het formaat JJJJ-MM-DD (jaar-maand-dag).

- **Controleer de verpakking**

Gebruik de sensor niet als de steriele verpakking beschadigd of geopend is, omdat dit een infectie kan veroorzaken.

- **Schone en droge huid**

Maak uw handen en de plaats waar u de sensor aanbrengt schoon en droog voordat u de sensor plaatst.

Was uw handen met water en zeep (niet met gelreinigers), en droog ze vervolgens af voordat u de sensorverpakking opent. Als uw handen vuil zijn bij het plaatsen van de sensor, kunt u ziektekiemen op de aanbrengplaats en daardoor een infectie krijgen.

Reinig de aanbrengplaats met een alcoholdoekje om infecties te voorkomen. Breng de sensor pas aan als uw huid droog is. Als de aanbrengplaats niet schoon en volledig droog is, loopt u het risico van infectie of het niet goed plakken van de zenderhouder.

Zorg ervoor dat u geen insectenspray, zonnebrandcrème, parfum of lotion op uw huid hebt.

• **Waar aanbrengen: te controleren dingen**

Houd het beschermkapje aangebracht totdat u de G6 applicator op uw huid plaatst. Als u eerst het beschermkapje verwijdert, kunt u uzelf ietsel toebrengen door per ongeluk op de knop te drukken waardoor de sensor wordt aangebracht voordat u dat van plan bent.

Verander de aanbrengplaats voor elke sensor. Als u dezelfde plaats te vaak gebruikt, kan het gebeuren dat de huid niet geneest, wat littekens of huidirritatie veroorzaakt.

De plaatsing van de sensor is belangrijk. Kies een plaats:

- Op ten minste 8 cm van de infusieset van de insulinepomp of de injectieplaats
- Uit de buurt van broekband, littekens, tatoeages, irritatie en botten
- Het is niet waarschijnlijk dat u tijdens het slapen wordt gestoten, geduwd of erop ligt

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften voor de zender

Waarschuwingen

• **Controleer**

Gebruik geen beschadigde of gebarsten zender. Een beschadigde zender kan ietsel veroorzaken door elektrische schokken en kan ervoor zorgen dat de G6 niet correct werkt.

• **Gebruik zoals voorgeschreven**

De zender is klein en kan verstikkingsgevaar opleveren. Stop hem niet in uw mond of zorg ervoor dat hij niet wordt vastgehouden door kinderen zonder toezicht van een volwassene.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Voorzorgsmaatregelen

• **Hergebruik – Gooi niet weg**

Gooi de zender niet weg wanneer u een sessie beëindigt. De zender is herbruikbaar totdat de G6 u meldt dat de batterij van de zender bijna leeg is. Voor gezondheidszorgprofessionals: zie de reinigings- en desinfectie-instructies in de professionele gebruiksaanwijzing. Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften voor het systeem

Voorzorgsmaatregelen

• **Behandelbeslissingen**

Gebruik uw G6-meting en trendpijl om behandelbeslissingen te nemen.

• **Gebruik de correcte zender, ontvanger en sensor**

G6-componenten zijn niet compatibel met eerdere Dexcom-producten. Combineer geen zenders, ontvangers en sensoren van verschillende generaties.

- **Doorgang door veiligheidscontrolepunt**

Vraag tijdens het dragen van uw G6 om fouillering met een handbediende metaaldetector of handmatige fouillering van het hele lichaam en visuele inspectie in plaats van door de Advanced Imaging Technology (AIT) bodyscanner te gaan (ook wel millimetergolfs scanner genoemd) of enig onderdeel van de G6 in de bagage-röntgenmachine te plaatsen.

U kunt de G6 dragen in de metaaldetectiepoort. Als u dat doet, gebruik dan pas uw meter voor behandelbeslissingen wanneer u het veiligheidsgebied hebt verlaten. Omdat we niet alle röntgenmachines en scanners hebben getest, weten we niet of deze de G6 beschadigen.

Weet u niet zeker wat voor soort machine het is? Wees veilig – vraag om fouillering met een handbediende metaaldetector of handmatige fouillering van het hele lichaam.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften ontvanger en mobiel apparaat

Voorzorgsmaatregelen

- **Houd de zender in de buurt van het weergaveapparaat**

Houd uw zender en weergaveapparaat binnen 6 meter zonder obstakels (zoals muren of metaal) ertussen. Anders zijn ze mogelijk niet in staat zijn om te communiceren. Als er water tussen uw zender en het weergaveapparaat zit – bijvoorbeeld als u aan het douchen of zwemmen bent – houd ze dan dichterbij elkaar. Het bereik wordt verkleind omdat *Bluetooth*® minder goed werkt via water.

- **Ontvangst van alarm/waarschuwingen op het gebruikte weergaveapparaat**

Om alarm/waarschuwingen te ontvangen, stelt u deze in op het weergaveapparaat dat u gebruikt. Uw ontvanger ontvangt niet het alarm/de waarschuwingen die u hebt ingesteld op uw app. En andersom, uw app ontvanger ontvangt niet het alarm/de waarschuwingen die u hebt ingesteld op uw ontvanger.

- **Is hij aan?**

Als de ontvanger of het mobiele apparaat is afgezet (uitgeschakeld), worden er geen G6-metwaarden of alarmen/waarschuwingen weergegeven. Controleer of uw weergaveapparaat is ingeschakeld.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften mobiel apparaat

Waarschuwingen

- **Controleer de instellingen**

Wanneer u uw mobiel apparaat gebruikt, moet u controleren of het volume omhoog is gedraaid, het geluid van uw telefoon niet is gedempt en of er geen hoofdtelefoon is aangesloten. Als het volume niet omhoog is gedraaid, het geluid van het apparaat is gedempt of de hoofdtelefoon is aangesloten, hoort u geen meldingen, waaronder belangrijke alarmen. Wanneer u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op uw Android®, klinken alarm/waarschuwingen via de hoofdtelefoon en de luidspreker. Op uw Apple® klinken ze alleen via de hoofdtelefoon.

Sommige meldingen zijn stil tijdens de eerste visuele en trilmelding en maken vervolgens een geluid bij de tweede melding. Als u de waarschuwing niet wist, wordt deze na 5 minuten herhaald op de helft van het volume en na 10 minuten op het volledige volume.

Uw alarm en belangrijke waarschuwingen klinken en geven informatie weer, ook wanneer het volume laag of gedempt is. Als uw mobiel apparaat gedempt is, klinken alleen deze meldingen:

- Glucose Alarm/Waarschuwingen:
 - Urgent Laag
 - Urgent Laag Binnenkort
 - Lage Glucose
 - Hoge Glucose
 - Stijgingsnelheid
 - Dalingsnelheid
 - Geen Metingen Waarschuwing
 - Systeemwaarschuwingen:
 - Kalibratie vereist (na 2 uur warming-up van de sensor, wordt alleen weergegeven wanneer geen sensorcode wordt gebruikt)
 - Kalibratiefout (verschijnt alleen wanneer een gebruiker een kalibratie invoert; kalibratie is niet nodig)
 - Sensor vervallen
 - Vervang sensor
 - Zender (werkt niet)
 - Geen Opslag Fout
 - App gestopt
 - Uitzonderingen: op Apple-apparaten klinkt het signaalverlies niet wanneer het volume laag of gedempt is. Geen alarm/waarschuwingen op uw telefoon wanneer uw Android-telefoon zich in de meest restrictieve instelling 'Niet storen' bevindt.
 - *Bluetooth*: Uw zender communiceert met uw app via *Bluetooth*. Controleer of *Bluetooth* op uw mobiel apparaat is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, ontvangt u geen alarmen/waarschuwingen of CGM-informatie.
- Meldingen:
 - Zorg ervoor dat de instellingen van uw mobiel apparaat Dexcom app-meldingen laten zien op uw Vergrendelscherm. Hierdoor kunt u meldingen zien zonder uw telefoon te ontgrendelen.
 - Apple: schakel tijdens het instellen van de G6 Dexcom app-meldingen in want anders ontvangt u geen alarm/waarschuwingen.
- Batterij: de app moet altijd op de achtergrond draaien en kan de batterij van uw mobiel apparaat leeg maken. Houd de batterij opgeladen.
- Compatibiliteit: controleer dexcom.com/compatibility voordat u uw mobiel apparaat of besturingssysteem updatet. Automatische updates van de app of het besturingssysteem van uw apparaat kunnen de instellingen wijzigen of de app afsluiten. Werk altijd handmatig bij en controleer daarna de juiste apparaatinstellingen.
- Tijd: laat de datum en tijd op uw mobiel apparaat automatisch bijwerken wanneer u door tijdzones reist of overschakelt tussen standaard- en daglichtbesparende tijden. Wijzig de tijd van uw mobiel apparaat niet handmatig, omdat dit de tijd op het trendscherm verkeerd kan maken en de app kan stoppen met het weergeven van gegevens.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Voorzorgsmaatregelen

- Controleer aanvullende apparaten
- Gebruikt u een hoofdtelefoon voor uw mobiel apparaat? Hoe zit het met *Bluetooth* -luidsprekers of een smartwatch? Wanneer u accessoires gebruikt, moet u er rekening mee houden dat u uw alarm/waarschuwingen mogelijk slechts op één apparaat of accessoire krijgt, dus niet op alle. Nadat u een aanvullend apparaat hebt aangesloten, moet u ervoor zorgen dat u met de instellingen van uw smartphone alarmen of waarschuwingen kunt blijven ontvangen.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften ontvanger

Waarschuwingen

- **Niet gebruiken indien beschadigd**

Gebruik geen beschadigde of gebarsten ontvanger. Een beschadigde ontvanger kan letsel veroorzaken door elektrische schokken en kan ervoor zorgen dat de G6 niet correct werkt.

- **Gebruik de kabel zoals voorgeschreven**

Gebruik de USB-kabel alleen zoals aangegeven en bewaar deze op veilige wijze. Verkeerd gebruik van de USB-kabel kan wurgingsgevaar opleveren.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Voorzorgsmaatregelen

- **Test luidspreker en trillingen**

U moet een alarm/waarschuwing horen of voelen om erop te reageren, dus test regelmatig de luidspreker van uw ontvanger en de trillingen.

Om er zeker van te zijn dat de luidspreker en trillingen werken, sluit u de ontvanger aan om deze op te laden. Het scherm Luidsprekertest verschijnt gedurende een paar seconden. Volg de aanwijzingen op het scherm om de luidspreker en de trillingen te testen. Als u ze hoort en voelt, prima! Maar als hij niet piept en trilt – misschien is hij nat geworden of gevallen – neem dan contact op met uw plaatselijke Dexcom-vertegenwoordiger.

- **Houd schoon en droog**

Dompel uw ontvanger niet onder in water en zorg ervoor dat er geen vuil of water in de USB-aansluiting terechtkomt. Daardoor zou hij kunnen beschadigen.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften Dexcom Share

Belangrijke informatie voor gebruikers

Met Dexcom Share (Delen) kunt u uw sensorgegevens vanuit uw app naar de mobiele apparaten van uw volgers sturen! Lees de aanwijzingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen hieronder om te ontdekken hoe u deze app-functie veilig kunt gebruiken.

Uw diabetesveiligheidsvoorschriften delen en beheren

Gebruiksindicaties

- **Houd volgers op de hoogte**

Gebruik Share om uw sensorinformatie van uw mobiel apparaat naar de mobiele apparaten van uw volgers te verzenden.

- **Gebruik als secundaire melding**

De informatie op uw mobiel apparaat wordt rechtstreeks verzonden vanaf uw G6-zender. Nadat de informatie op uw apparaat aanwezig is, verzendt Share deze naar uw volgers. De informatie voor uw volgers is dus altijd ouder dan de uwe. Gebruik uw huidige informatie om uw diabetes te beheren, niet de mogelijk verouderde informatie van uw volgers.

Uw volgers kunnen de informatie die ze krijgen gebruiken om contact met u op te nemen en u te ondersteunen bij het beheer van uw diabetes. De informatie die ze krijgen is niet bedoeld om te worden gebruikt voor behandelbeslissingen, analyse of onderwijs. Volgers kunnen uw informatie niet wijzigen.

Waarschuwingen

- Gebruik uw G6 om behandelbeslissingen te nemen

Gebruik Share-informatie niet voor behandelbeslissingen, zoals het behandelen van een lage waarde of het doseren van een hoge waarde. Gebruik in plaats daarvan de sensorinformatie op uw G6.

- Neem advies op bij de zorgverlener

Heeft uw gezondheidszorgprofessional u taken gegeven ter zelfcontrole? Blijf ze doen. Het hebben van volgers vervangt deze niet.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Veiligheidsvoorschriften over setup en instellingen van Share

Waarschuwing

- **Volgers moeten volgen en u moet delen**

U moet Share inschakelen om uw sensorinformatie naar uw volgers te sturen. Volgers moeten de Dexcom Follow-app downloaden om te zien wat u verstuurt.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.

Voorzorgsmaatregelen

- **Volgers beheren niet uw diabetes, maar u wel**

Vertrouw niet op uw volgers om u te laten weten dat u een behandelbeslissing moet nemen. Blijf op de hoogte van uw diabetesbeheer. Kijk vaak op uw G6. Reageer op alarm/waarschuwingen. Wacht niet tot de volger contact opneemt – het is mogelijk dat hij/zij uw sensorinformatie niet krijgt vanwege een technisch probleem.

- **Controleer uw mobiel apparaat en de mobiel apparaten van uw volgers**

- Internettoegang vereist: beide mobiele apparaten moeten met het internet verbonden zijn om Share te kunnen gebruiken. Probeer uw volger een e-mail te sturen vanaf uw apparaat. Als uw volger deze op zijn apparaat ontvangt, zijn beide mobiele apparaten met elkaar verbonden.

- Batterijen opgeladen: zorg ervoor dat de batterijen van het mobiel apparaat zijn opgeladen. Als de batterijen van uw mobiel apparaat of dat van uw volger niet zijn opgeladen, werkt Share niet.

- **Controleer uw mobiel apparaat**

App aan: tik op de G6-app om hem te openen wanneer u uw mobiel apparaat inschakelt. Als de app niet geopend is, zal Share niet werken.

- Controleer mobiele apparaten van volgers

- Geluiden aan: volgers moeten het volume van hun mobiel apparaat aan houden, of ten minste de trillingen ervan, zodat ze alarm/waarschuwingen kunnen horen en/of voelen. De instellingen van het mobiel apparaat overtroeven de instellingen van de volger-app.

Hiaten in het delen: volgers zullen uw sensorinformatie niet ontvangen wanneer hun mobiele apparaat uit staat, niet verbonden is met internet of zich in de modus 'Niet storen' of in de Vliegtuigmodus bevindt. Wanneer de volgers die problemen oplossen, zullen zij de actuele informatie beginnen te ontvangen maar niet de informatie die ze gemist hebben.

- De provider ondersteunt gelijktijdige spraak en data: de meeste providers ondersteunen het gebruik van tegelijkertijd spraak en data. Controleer die van u en laat volgers die van hen controleren. Als deze functie niet wordt ondersteund, werkt Share niet tijdens telefoongesprekken. Share start opnieuw op wanneer het gesprek is beëindigd en verstuurt eventuele wachtmeldingen

- **Share aanpassen zodat volgers u kunnen ondersteunen**

- Pas Share aan om ervoor te zorgen dat uw volgers de informatie hebben die ze nodig hebben om u te helpen uw diabetes te beheren.

- Vertragingfunctie: uw volger wordt pas na de door u ingestelde vertragingstijd op de hoogte gesteld.

- Functie Niet delen: u kunt het delen met een volger te allen tijde stoppen door Niet delen te kiezen. Die volger ontvangt uw sensorinformatie pas weer wanneer u ervoor kiest om opnieuw te delen.

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden.