

# *Fasmedo*<sup>®</sup> Medical Originality

FM-100 メディカム



クイックスタートガイド

詳細情報については、  
[www.fasmedo.com](http://www.fasmedo.com) にアクセス  
するか、右の QR コードを  
スキャンしてください。



# 1. パッケージの内容



1. クイックスタートガイド
2. 表示領域校正表 x 1
3. メディカム本体 x 1
4. 革製カバー付きプラスチック製鋼板 x 1
5. 18650 バッテリー x 2、電源アダプター x 1
6. 電源ケーブル付きバッテリー充電器 x 1
7. ブルートゥースペダル x 1
8. タイプ C ケーブル x 1
9. 予備用革製カバー x 1
10. ベルト x 1

# 2. 外観説明

前面

背面



1. レンズ
2. LED
3. ヒンジ
4. 電源ボタン
5. フロントホルダー
6. バッテリーカバー
7. 録画ボタン
8. スピーカー
9. USB-C ポート
10. 出荷時設定リセットボタン

# 3. メディカムを使用する ⑨ 前に

- A. 初めてメディカムを使用する前に、少なくとも 4 時間バッテリーをフル充電しておいてください。
- B. 他製品のケーブルやアダプターを使用しないでください。
- C. コンピューターで充電することはお勧めできません。

## 4. バッテリーを挿入する

コインを使用して、下端からカバーを取り外します。

「+」と「-」の印に注意しながら、「+」側を下にして、1個のバッテリーを慎重に挿入します。カバーを取り付けて、所定の位置にはめ込みます。

## 5. オプションのフロントホルダーを取り付ける/取り外す

**取り付け：**下部アームを下部溝に挿入し、上方向に所定の位置にはめ込みます。



**取り外し：**フロントホルダーを上部溝から引き出して取り外します。



### 5.1 ベルト（オプション）の取り付け方

- 革製カバーをフロントホルダーから取り外します。
- フロントホルダーの中央にあるネジを締めます。
- フロントホルダーの側面をベルトの穴に挿入します。
- 革製カバーをフロントホルダーに戻します。



## 6. メディカムの電源を入れる

電源ボタン

A. オン/オフ：電源ボタンを3秒間押し続けて、  
メディカムの電源をオン/オフにします。電源  
をオンにすると、LEDが緑色に点灯します。




B. LED：LEDのさまざまな状態については、電源ボタンを  
押し切り替えしてください。（低->中->高->オフ->  
繰り返し）録画時はLEDを点灯させることをお勧めし  
ます。

## 7. メディカムをアプリに接続する

（iPadがすでにメディカムとペアリングされている場合  
は、手順8に進んで下さい。）

### 7.1 アプリをダウンロードする

App Storeで、「MediCam（メディカム）」を検索して、  
アプリをスマートデバイス（スマホ、タブレットなど）  
にダウンロードします。

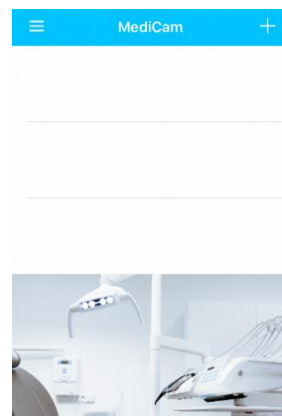

### 7.2 メディカムをペアリングする

開始画面に空白のリストが表示されます。



画面の右上隅にある[+]アイコンをタップして、

メディカムを追加します。

## 7.3 設定

スマートデバイスで、Wi-Fi とブルートゥースが有効になっていることを確認します。

- A. 新しいメディカムが見つかったら、リストの新しいメディカムをタップし続行します。
- B. 「Join MediCam's network (メディカムのネットワークに参加する)」を確認します。
- C. スマートデバイス上に撮影する領域のプレビューが表示されます。

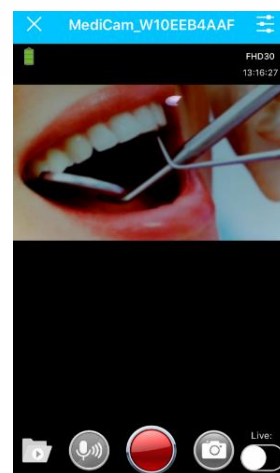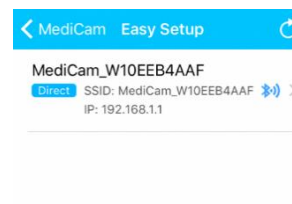

## 8. 動画の撮影方法

録画を開始する前に、「View Area Calibrator (表示領域校正表)」を快適な作業距離 (通常約 30cm) の近くに置き、次に撮影する領域に合わせてレンズを調整します。

(ヒンジの調整可能角度は、約 0~78 度です。)

色分けされた撮影領域ガイドを使用して、どのズームレベルを希望するか選択します。(狭い、中程度、広い)

### 8.1 録画ボタンをクリックする

録画ボタンを押し録画を開始し、もう一度押すと録画が停止します。（高ピッチ音が録画開始、低ピッチ音が録音停止。）



## 8.2 アプリの画面をタップする

プレビューモードでは、赤い録画ボタンをタップして、動画や写真を撮影することができます。


## 8.3 ペダルを使用する

- A. ペダルを使用する前に、少なくとも 3 時間フル充電しておいてください。
- B. 電源スイッチを押して、設定用ペダルに電源を入れます。
- C. ブルートゥースに接続して、ペダルをペアリングします。「Bluetooth Music Pedal（ブルートゥース音楽ペダル）」を選択して、接続します。
- D. ペアリング中は、ペダルの LED が複数の色で点滅します。ペアリングが完了すると、LED は点滅を停止します。（赤い LED が点滅しているときは、ペダルを充電してください。）
- E. 動画を撮影する場合は左のペダル、写真を撮影する場合は右のペダルを使用してください。

## 9. デバイスの設定



プレビュー画面で、右上隅にあるツールアイコン (☰) をタップして、動画/写真の表示を設定します。

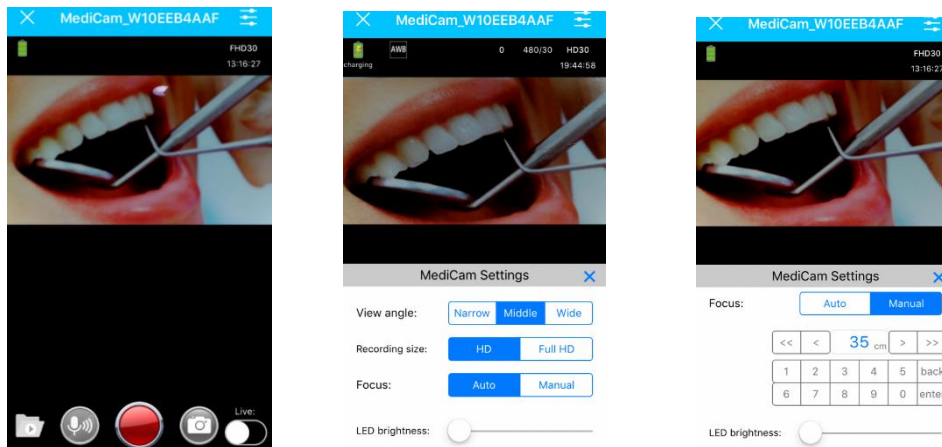

## 10. メディカムの動画/写真を管理する


### 10.1 メディアファイルをメディカムから PC に保存する

- A. メディカムを PC に USB ケーブルで接続します。
- B. メディカムの電源を入れ、内蔵メモ리카ードに保存されているメディアファイルにアクセスします。
- C. PC で動画 (VIDEOS フォルダ) と写真 (PHOTOS フォルダ) を表示し、必要なファイルを表示/保存するように選択します。

### 10.2 メディアファイルをアプリからスマートデバイスに保存する

- A. 開始画面で、ギアアイコン (⚙) をクリックして、

「Manage Photo and Video（写真および動画を管理する）」をタップして、必要なファイルをスマートデバイスに保存します。

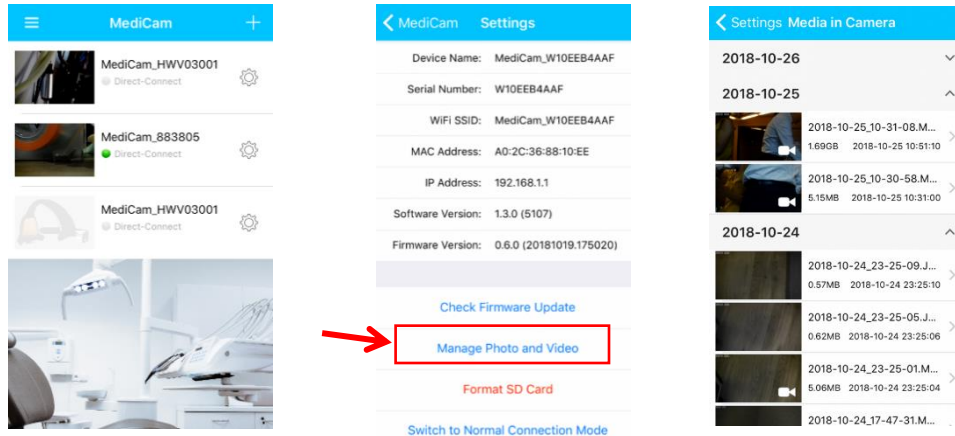


B. または、プレビューモードで、フォルダーアイコンをタップして、必要なファイルをスマートデバイスに保存します。

### 10.3 ファイルを削除する

ファイルが PC またはスマートデバイスに保存されたら、メディカムのファイルを削除して新しいビデオを録画するためのスペースを確保します。

## 11. ライブストリーミング

ライブストリーミングの使用を開始する前に、セルラー 4G 対応スマートデバイスを手に入れ、スマートデバイスを

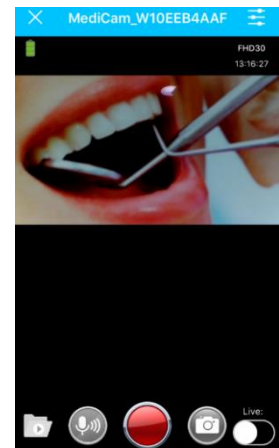





セルラー4G ネットワークに接続してください。（セルラー契約は含まれていません）

## 11.1 ライブイベントを開催する

（デフォルトの視聴時間は 1,000 時間です。視聴時間にて累積されます。）

- A. アプリで動画ストリーミングを視聴しているときは、「Live (ライブ)」をタップして、ライブ放送に切り替えます。
- B. アプリは、「Prepare live streaming... (ライブストリーミングの準備をしています...)」と表示します。その後、「Started live streaming... (ライブストリーミングを開始しています...)」と表示します。
- C. ライブストリーミングが開始されると、共有コードが届きます。「Share (共有)」アイコン (📎) をタップして、友人と共有します。

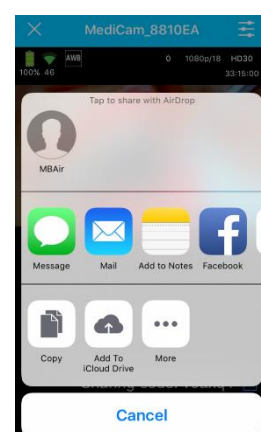
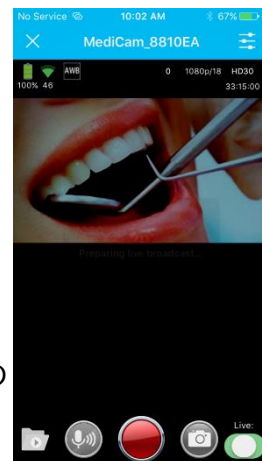


## 11.2 ライブイベントを視聴する

A. すべての招待されたユーザーは、ライブイベントを視聴する前に、メディカムアプリをダウンロードする必要があります。

B. 「Live Events (ライブイベント)」をタップして先に進み、



[+]アイコンをタップして、ライブイベントを追加し、受け取った共有コードを入力します。

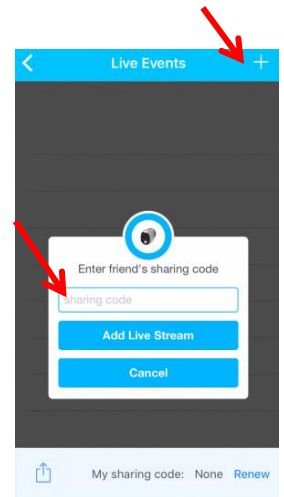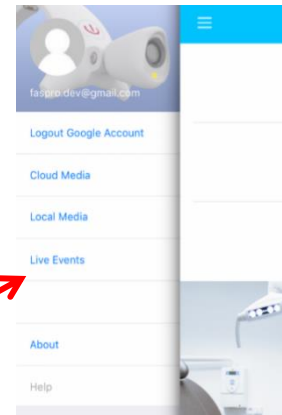

C. ライブイベントがリストに追加されます。緑色のライトは、イベントが現在開催中であることを示します。

D. ライブイベントをタップすると、視聴者はライブストリーミングビューに移動します。再生コントロールはありません。「X」アイコンをタップして終了しま

す。

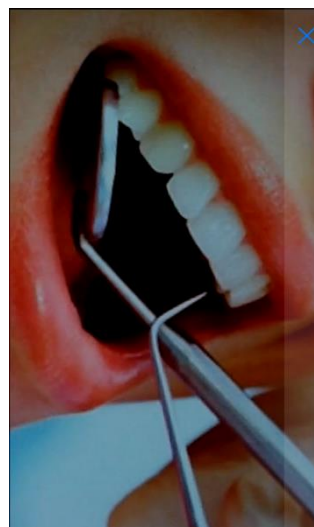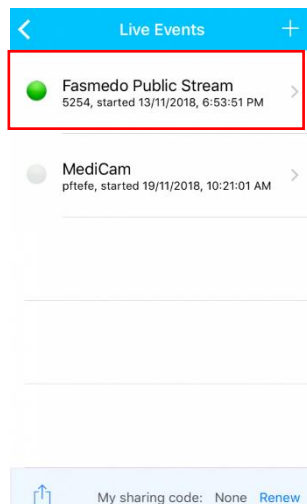

## 12. ボタン／LED の機能

モード	前面 LED の動作
電源オン	起動中：高速点滅 ● アイドル時：バッテリー残量 20%以上 ●、 バッテリー残量 20%未満 ●
録画中	バッテリー残量 20%以上：低速点滅 ● バッテリー残量 20%未満：高速点滅 ●
Wi-Fi 未接続	バッテリー残量 20%以上：低速点滅 ●● バッテリー残量 20%未満：低速点滅 ●●
充電中	バッテリー残量 100%未満：低速点滅 ● バッテリー残量 100% ●
電源オフ	消灯：○
メモリ一杯	低速点滅 ●

## 13. 安全に関する注意事項

1. デバイスにより生成されるワイヤレス信号は、医療機器（ペースメーカーまたは補聴器など）の干渉または誤動作を引き起こす可能性があります。メディカムを慎重に使用してください。
2. メディカムは、身体装着型デバイスの比吸収率（SAR）の制限を満たすように試験されています。EU の最大許容レベルは 2.0 W/kg ですが、メディカムはこの値より低くなっています。
3. 視力低下を防ぐため、LED を直接見ないようにしてください。

4. メディカム専用設計または承認されたメディカムアダプターまたは充電器のみを使用することをお勧めします。
5. メディカムを火やヘアドライヤー、電子レンジ、その他の電気器具を含む他の熱源にさらさないでください。
6. いかなる理由があっても、本デバイスを分解しないでください。
7. デバイスの接続部、接続部、またはボタンに物を無理に押し込まないでください。コネクターがうまく挿入できない場合は、一致してない可能性があります。
8. メディカムにスプレークリーナーを使用しないでください。システムに損傷を与える可能性があります。

## 14. 規格および規制



All rights reserved©2018 Faspro Systems Co., Ltd.

電話:+886-2-2517-0160

**FASPRO**  
Find A better Solution

6F, No.160, Sec. 2, Nanjing E. Rd.,  
Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan  
<https://www.fasprosystems.com>