


USE CAMISINHA! PRAZER SEM RISCOS.

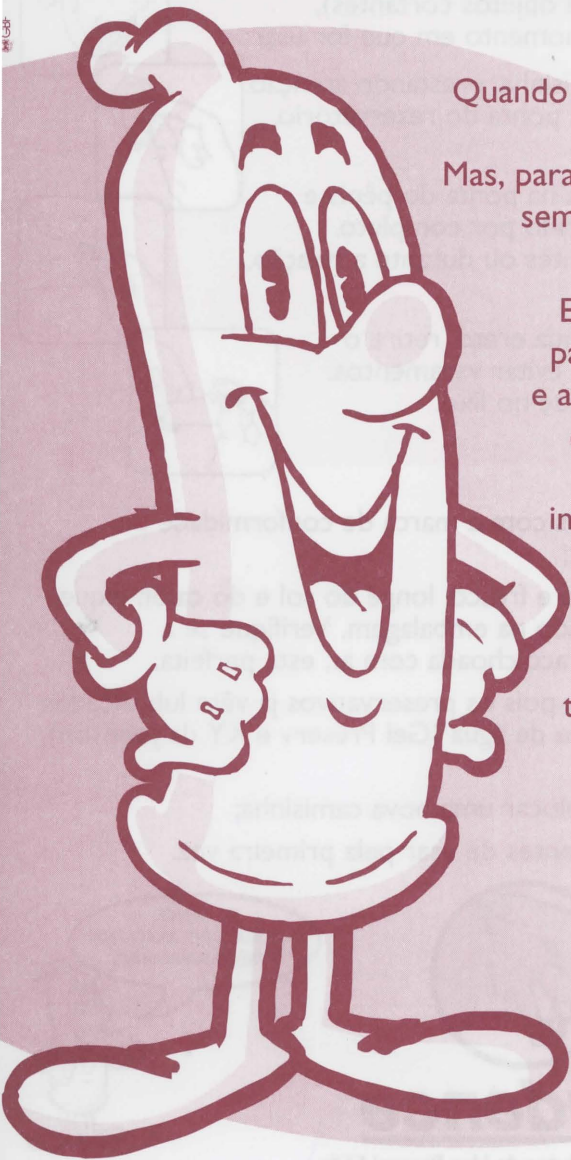

Quando corpos se atraem e o desejo toma conta, as pessoas se amam. Mas, para que tudo aconteça perfeitamente, sem futuras consequências, lembre-se: **a camisinha é a sua garantia.**

Em qualquer tipo de relação sexual, para evitar que o sangue, o esperma e as secreções vaginais passem de um corpo para o outro, use camisinha.

Assim você evita a gravidez inesperada, e se protege de doenças sexualmente transmissíveis como **AIDS**, sífilis, gonorréia, e outras.

Não tenha preconceitos, viva todas as emoções de forma segura.

Tenha sempre uma camisinha à mão!

VEJA NO VERSO
COMO É FÁCIL USAR
A CAMISINHA!



Os preservativos são vendidos em farmácias, supermercados e distribuídos gratuitamente nos Postos de Saúde. Portanto, não é por desconhecimento ou economia que você vai deixar de usar.

Feitas de borracha de látex natural vulcanizada, as camisinhas **Prudence** são testadas eletronicamente para garantir seu conforto e segurança. Embalados individualmente, os preservativos são lubrificados e garantem seu prazer por completo, sem riscos e preocupações.

MODO DE USAR

- 1** Abra o envelope pelo picote (evite objetos cortantes), e retire a camisinha somente no momento em que for usar;
- 2** Com o pênis ereto coloque a camisinha, prestando atenção para que fique um espaço vazio na ponta do reservatório, onde ficará o espermatozoide;
- 3** Aperte o bico, encaixe a camisinha na ponta do pênis e desenrole-a com cuidado, até cobri-lo por completo. Se ficar mal encaixada ou rasgar antes ou durante a relação, troque-a imediatamente;
- 4** Após a ejaculação, com o pênis ainda ereto, retire o preservativo cuidadosamente para evitar vazamentos. Embrulhe em papel higiênico e jogue no lixo.



IMPORTANTE

- Procure sempre comprar preservativos com a marca de conformidade do INMETRO e/ou Instituto Falcão Bauer;
- Guarde os preservativos em local seco e fresco, longe do sol e do calor. Fique atento ao prazo de validade, especificado na embalagem. Verifique se a embalagem não está furada: se estiver acolchoada com ar, está perfeita;
- Não se deve passar nada na camisinha, pois os preservativos já vêm lubrificados. Se desejar, utilize um lubrificante à base de água (Gel Preserv e KY da Johnson), que não cause danos à borracha;
- Lembre-se a cada relação é preciso colocar uma nova camisinha;
- Se você nunca usou camisinha, treine antes de usar pela primeira vez.



Prudence

PRUDENCE.
QUALIDADE INTERNACIONAL
E PREÇO SUBSIDIADO.



DKT DO BRASIL Produtos de Uso Pessoal Ltda.

Av. Brig. Faria Lima, 1106 - Conj. 1110 - CEP 01452-000 - Tel.: (011) 814-4680 - Fax: (011) 211-4237